
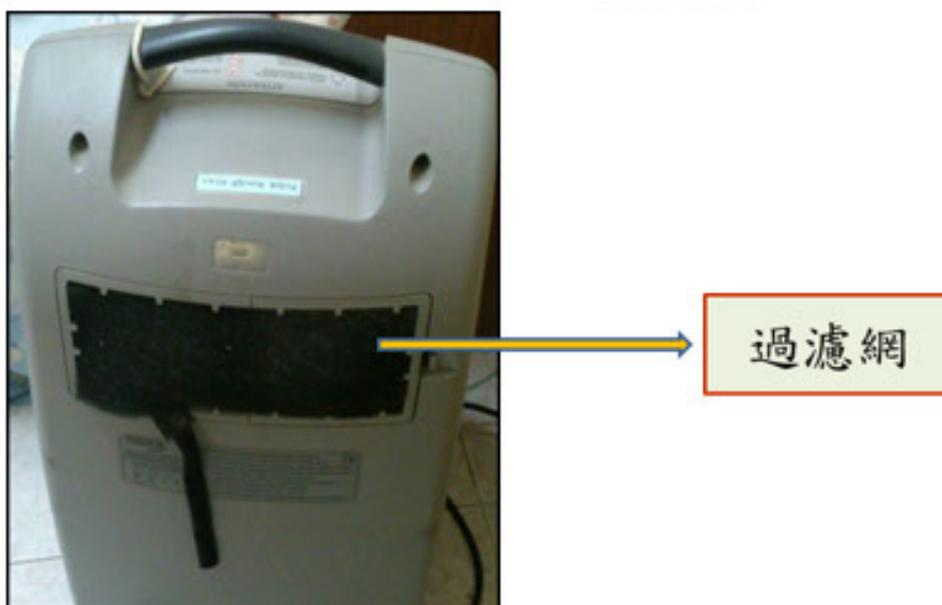
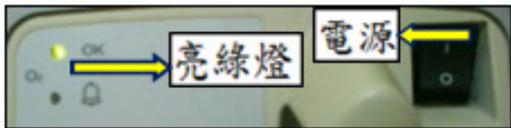


# Nidek 氧氣製造機操作

## 一、製氧機設備圖解

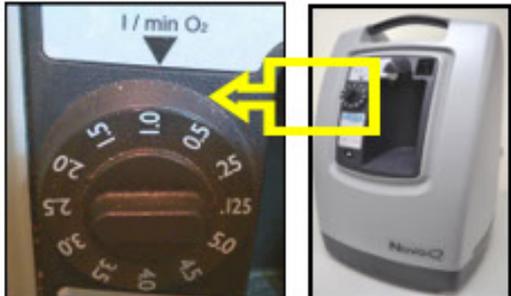

## 二、操作步驟


參考圖片	操作步驟
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 連接氧氣雙頭接管噴嘴下的聖誕樹。</li><li>2. 確認所有零件接頭都有鎖緊以防止漏氣。</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. 打開電源, 此時亮綠燈。</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. 打開所需的氧氣流量。 (ex: 假設氧氣用量為 1L, 請將調整鈕上 1.0 轉向▼即可)。</li></ol>

## 三、注意事項

1. 機器背面(入氣口)須與牆面距離 15cm 以上，保持通風。
2. 機器不使用時，勿將潮濕瓶裝上，以防機器受潮損壞。
3. 機器若 1 星期以上不使用時，則每週須開機空轉 1 小時。
4. 如遇機器故障或停電，請自備氧氣鋼瓶因應緊急狀況。



## 四、警報器

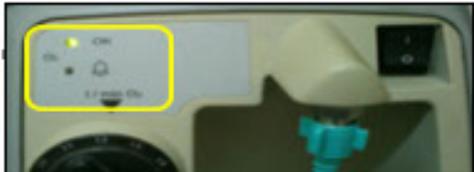正常運作時量綠燈	異常警報時量紅燈
	

異常警報	可能原因	處理方式
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源線是否脫落</li> <li>2. 插座沒電</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查電源線</li> <li>2. 檢查插座是否有電</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 氧氣接管是否鬆脫或壓折</li> <li>2. 潮濕瓶沒鎖緊</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查氧氣接管及接頭</li> <li>2. 鎖緊潮濕瓶</li> </ol>
壓縮機運轉中忽然停止，數分鐘後又可重新啟動	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 壓縮機故障</li> <li>2. 風扇不動作</li> <li>3. 過濾器過髒，阻塞進氣</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通知維修人員或居護所人員</li> <li>2. 機器停止使用</li> </ol>

## 五、清潔及保養

參考圖片	清潔及保養
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每天使用乾布清潔機器外表。</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 每週清洗過濾棉，待過濾棉晾乾後再行裝上。</li> <li>3. 若在灰塵較多的地區，請隨時檢查並清洗。</li> </ol>