

Trilogy100 呼吸器操作


一、外觀介紹(前面)



外觀介紹(後側面)




二、警報處理

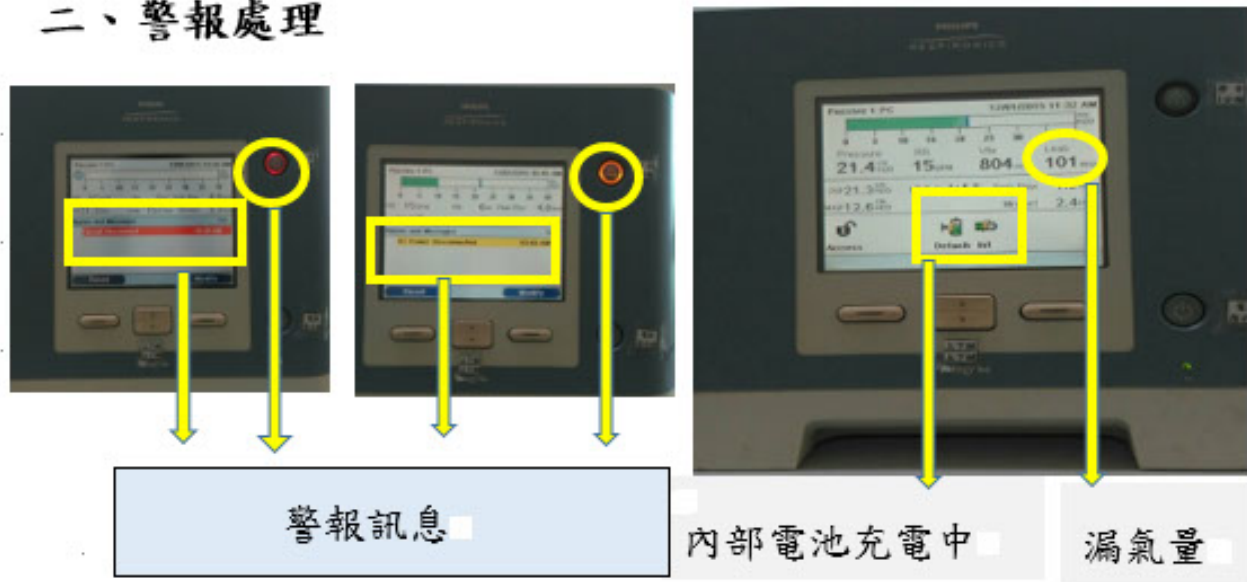

警報訊息	處理
1.AC Power Disconnected	檢查電源線是否鬆脫
2.Circuit Disconnected	檢查L型管或面罩是否鬆脫，漏氣量應< 80 l/min
3.Check Circuit	檢查管路或集水瓶是否積水
4.Low Minute Ventilation	檢查L型管或面罩是否鬆脫
5.Low Circuit Leak	檢查吐氣閥是否被塞住

三、管路更換(準備用物)

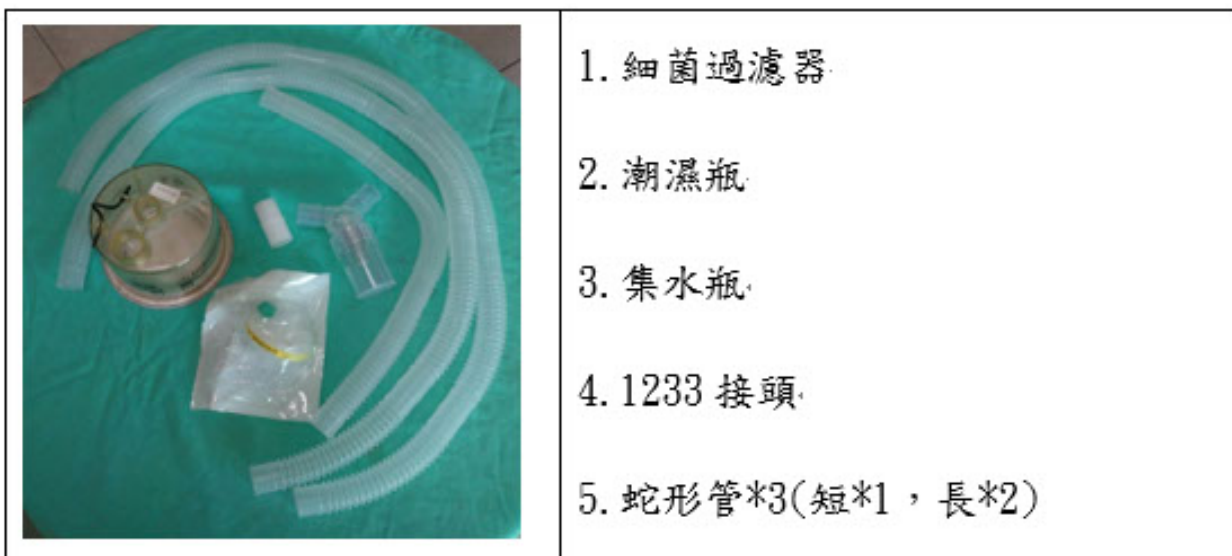

1. 細菌過濾器
2. 潮濕瓶
3. 集水瓶
4. 1233 接頭
5. 蛇形管*3(短*1，長*2)

四、換管步驟



1. 剪 2 條 6 節蛇形管，兩端連接集水瓶(圖一)。



2. 剪 1 條 3 節蛇形管，連接 1233 接頭(圖二)。



3. 將潮濕瓶加 RO 水至黑線位置。



4. 將蛇形管連接潮濕瓶，短蛇形管連接細菌過濾器至呼吸器，長蛇形管連接患者。



5. 呼吸器管路完成圖。