

# 呼吸器零件消毒

## 一、消毒目的

定期消毒更換管路，可避免病原入侵，降低患者感染率。

## 二、消毒期限

每次更換管路及消毒時間以不超過 14 天為限。

## 三、準備用物



1. 白醋
2. 水(RO 或煮沸過的開水)
3. 量杯
4. 泡消盒
5. 消毒零件

## 四、消毒步驟

	<p>1. 取下呼吸器零件、潮濕瓶用自來水沖洗乾淨(圖一)。</p>
	<p>2. 將白醋:RO 水=1:3，將物品泡消於消毒液中，靜置 30 分鐘(圖二)。</p>
	<p>3. 物品取出後，用 RO 水沖洗零件(圖三)。</p>
	<p>4. 晾乾(圖四)。</p>

## 五、呼吸器零件簡介

				
<p>L 型接頭</p>	<p>集水瓶</p>	<p>吐氣閥</p>	<p>1233 接頭</p>	<p>潮濕瓶</p>